

SENSITITRE **RAPMYCOI** Mycobacterium Reference Card

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	SXT 0.25/4.75	SXT 0.5/9.5	SXT 1/19	SXT 2/38	SXT 4/76	SXT 8/152	LZD 1	LZD 2	LZD 4	LZD 8	LZD 16	LZD 32
B	CIP 0.12	CIP 0.25	CIP 0.5	CIP 1	CIP 2	CIP 4	IMI 2	IMI 4	IMI 8	IMI 16	IMI 32	IMI 64
C	MXF 0.25	MXF 0.5	MXF 1	MXF 2	MXF 4	MXF 8	FEP 1	FEP 2	FEP 4	FEP 8	FEP 16	FEP 32
D	FOX 4	FOX 8	FOX 16	FOX 32	FOX 64	FOX 128	AUG2 2/1	AUG2 4/2	AUG2 8/4	AUG2 16/8	AUG2 32/16	AUG2 64/32
E	AMI 1	AMI 2	AMI 4	AMI 8	AMI 16	AMI 32	AMI 64	AXO 4	AXO 8	AXO 16	AXO 32	AXO 64
F	DOX 0.12	DOX 0.25	DOX 0.5	DOX 1	DOX 2	DOX 4	DOX 8	DOX 16	MIN 1	MIN 2	MIN 4	MIN 8
G	TGC 0.015	TGC 0.03	TGC 0.06	TGC 0.12	TGC 0.25	TGC 0.5	TGC 1	TGC 2	TGC 4	TOB 1	TOB 2	TOB 4
H	CLA 0.06	CLA 0.12	CLA 0.25	CLA 0.5	CLA 1	CLA 2	CLA 4	CLA 8	CLA 16	TOB 8	TOB 16	POS CON

ANTIMICROBICS

SXT	Trimethoprim / sulfamethoxazole
CIP	Ciprofloxacin
MXF	Moxifloxacin
FOX	Cefoxitin
AMI	Amikacin
DOX	Doxycycline
TGC	Tigecycline
CLA	Clarithromycin
LZD	Linezolid
IMI	Imipenem
FEP	Cefepime
AUG2	Amoxicillin / clavulanic acid 2:1 ratio
AXO	Ceftriaxone
MIN	Minocycline
TOB	Tobramycin
POS	Positive Control

Indicates Sensititre® range where different to CLSI M24. For current Quality Control ranges refer to QC range document.

Sensititre® Bereich wo unterschiedlich zu CLSI M24. Für gegenwärtige Qualitätskontrolle beziehen sich Strecken auf QC Strecke Dokument.

Indica el rango esperado con Sensititre® en caso de diferir del establecido por el CLSI M24. Para el control de calidad actual las gamas refieren al documento de la gama de QC.

Indicare il range del Sensititre® laddove è differente dal CLSI M24. Per controllo di qualità corrente le gamme si riferiscono al documento della gamma di QC.

Δείχνει τη σειρά Sensititre® όπου διαφορετικός σε CLSI M24. Για τον τρέχοντα ποιοτικό έλεγχο οι σειρές αναφέρονται ως στο έγγραφο σειράς.

Indique où la gamme Sensititre® est différente à CLSI M24. Pour les gammes actuelles du contrôle Qualité, se référer au document de gamme de QC.

RANGES

Antimicrobial

Amikacin
Ciprofloxacin
Clarithromycin
Doxycycline
Linezolid
Moxifloxacin
Trimethoprim / sulfamethoxazole
Amikacin
Cefoxitin
Ciprofloxacin
Clarithromycin
Doxycycline
Imipenem
Linezolid
Tobramycin
Amikacin
Ciprofloxacin
Amoxicillin / clavulanic acid 2:1 ratio
Cefepime
Cefoxitin
Ceftriaxone
Ciprofloxacin
Clarithromycin
Doxycycline
Imipenem
Linezolid
Minocycline
Moxifloxacin
Tigecycline
Tobramycin
Trimethoprim / sulfamethoxazole

Organism

Mycobacterium Avium (ATCC 700898)
Mycobacterium Avium (ATCC 700898)
Mycobacterium Avium (ATCC 700898)
Mycobacterium Avium (ATCC 700898)
Mycobacterium Avium (ATCC 700898)
Mycobacterium Avium (ATCC 700898)
Mycobacterium Avium (ATCC 700898)
Mycobacterium peregrinum (ATCC 700686)
Mycobacterium peregrinum (ATCC 700686)
Mycobacterium peregrinum (ATCC 700686)
Mycobacterium peregrinum (ATCC 700686)
Mycobacterium peregrinum (ATCC 700686)
Mycobacterium peregrinum (ATCC 700686)
Mycobacterium peregrinum (ATCC 700686)
Mycobacterium smegmatis (ATCC 19420)
Mycobacterium smegmatis (ATCC 19420)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)
Staphylococcus aureus (ATCC 29213)

Range (µg/ml)

2–16#
4–16#
1–4#
>=16#
8–32#
0.25–4#
0.25/4.8–2/38#
≤1–4
4–32
≤0.12–0.5
≤0.06–0.5
0.12–0.5
2–16
1–8
2–8
0.12–0.5#
0.25–1#
0.12/0.06–0.5/0.25
1–4
1–4
1–8
0.12–0.5
0.12–0.5
0.12–0.5
0.015–0.06
1–4
0.06–0.5
0.015–0.12
0.03–0.25
0.12–1
≤0.5/9.5